
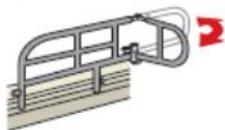


『医療・介護ベッド』点検チェック表

ベッドの点検はこのシートでチェックしましょう

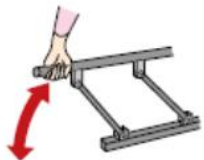

点検項目	点検方法	チェックポイント
ベッドの高さ調整	ベッドの高さを上限まで上げる	<input type="checkbox"/> 動作途中で止まらないか？ <input type="checkbox"/> 著しい異音やがたつきはないか？
ベッドの背／膝上げ	ベッドの背／膝を上限まで上げる	<input type="checkbox"/> 動作途中で止まらないか？ <input type="checkbox"/> 著しい異音やがたつきはないか？
ヘッド／フットボード	ボードを少し持ち上げる ボードを揺らす	<input type="checkbox"/> ボードが外れないか？ <input type="checkbox"/> 著しいがたつきはないか？
キャスター	ストッパー（固定）を掛ける ストッパー（固定）を掛けてベッドを押す ストッパー（固定）を解除してベッドを押す	<input type="checkbox"/> ストッパー（固定）が掛かるか？ <input type="checkbox"/> ベッドが動かないか？ <input type="checkbox"/> ベッドがスムーズに動くか？ <input type="checkbox"/> 車輪部に破損や著しい磨耗はないか？
差し込み式サイドレール	取付穴に差す	<input type="checkbox"/> 抜差しがスムーズにできるか？ <input type="checkbox"/> 著しいがたつきはないか？
可動式サイドレール	サイドレールを上下させる	<input type="checkbox"/> ストッパーの固定、解除はできるか？ <input type="checkbox"/> 動きは円滑か？ <input type="checkbox"/> 著しいがたつきはないか？
ベッド用グリップ（手すり）	グリップ部（アーム）を回転させる	<input type="checkbox"/> グリップ部の固定、解除はできるか <input type="checkbox"/> 動きは円滑か？ <input type="checkbox"/> 著しいがたつきはないか？
手元スイッチ	操作ボタンの概観 コードの外観 操作ボタンを押して離す	<input type="checkbox"/> 破損はないか？ <input type="checkbox"/> 傷、破損はないか <input type="checkbox"/> 何かに巻きつけてないか？ <input type="checkbox"/> 動きはスムーズか？ <input type="checkbox"/> ベッドは正しく動作するか？
電源コード	コード プラグ	<input type="checkbox"/> キャスターで踏みつけていないか？ <input type="checkbox"/> 傷、破損はないか？ <input type="checkbox"/> プラグに埃がたまっていないか？ <input type="checkbox"/> 傷、破損はないか？
手動操作ハンドル	上下方向に回転させる	<input type="checkbox"/> 操作がスムーズにできるか？ <input type="checkbox"/> 著しいがたつきはないか？
その他	可動部 ベッド各部 バンパーやキャップ等	<input type="checkbox"/> 異音がないか？（要グリスアップ） <input type="checkbox"/> ぐらつき（ネジの緩み）はないか？ <input type="checkbox"/> 部品の破損、欠損はないか？

☑できないチェック箇所があれば、購入された販売店か、お使いのベッドのメーカーまでお問い合わせ下さい。